

ИНСТРУКЦИЯ
по применению
Средства перевязочного
порошкообразного
СТАТИН-ПАЛЬМА

(Рег. уд. № ФСР 2008/02362 от 10.09.2012 г.)

НАЗНАЧЕНИЕ

Средство перевязочное порошкообразное СТАТИН предназначено для остановки капиллярных кровотечений, для заживления поверхностных неинфицированных ран, ожогов, трофических язв, пролежней, а также для обработки кожи вокруг стомы. СТАТИН изготовлен на основе альгината натрия, выделенного из бурых морских водорослей.

Стерилизован радиационным методом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

После туалета раны порошок наносится тонким слоем на влажную раневую поверхность или на влажную поверхность вокруг стомы. СТАТИН наносится до тех пор, пока верхний слой не перестанет промокать.

При обработке раневой поверхности или кожи вокруг стомы образовавшееся гелевое покрытие легко удаляется тампоном, смоченным любым раствором антисептика. Гель обеспечивает хороший водо- и газообмен и может оставаться на коже или раневой поверхности до полного заживления.

Возникающее иногда чувство жжения в ране кратковременно и проходит через 20-40 сек.

Кожу вокруг стомы обрабатывают СТАТИНОМ в тот период, когда пациент не использует калоприемник, и оставляют его на коже как можно дольше. Перед использованием калоприемника СТАТИН необходимо удалить, кожу подсушить.

Для фиксации СТАТИНА на поверхности кожи можно воспользоваться бинтом, например, липким бинтом БИНТЛИ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Применение средства СТАТИН противопоказано при лечении инфицированных, обильно экссудирующих ран.

ВИДЫ УПАКОВКИ

Пакет, 1 г.

Пакет, 1 г, 5 пак. в картонной коробочке.

Флакон, 8 г, в картонной коробочке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше + 40° С.

ООО “ГК ПАЛЬМА” выпускает также:

БИНТЛИ-Т - гипоаллергенный фиксирующий липкий бинт для фиксации повязок, игл, катетеров и т.п.

БИНТЛИ-М - очень мягкий гипоаллергенный фиксирующий липкий бинт повышенной драпируемости для фиксации повязок на локтевом, коленном суставах и т.п.

АЛЬГИПОР-М - ранозаживляющее покрытие для лечения ран различной этиологии, ожогов, пролежней, трофических язв и др.