

ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия
Средство перевязочное порошкообразное
СТАТИН-ПАЛЬМА®

ТУ 9393-007-11768608-2007 Рег. уд. № ФЦП 2008/02362 от 24.05.2018 г.

Описание

Средство перевязочное порошкообразное СТАТИН-ПАЛЬМА® представляет собой стерильный порошок кремового или светло серого цвета с кремовым оттенком. Изготовлен на основе альгината натрия, выделенного из бурых морских водорослей, и висмута нитрата основного. Стерилизован радиационным методом.

Показания к применению

Оказывает гемостатическое, ранозаживляющее и защитное действие.

СТАТИН-ПАЛЬМА® предназначен для остановки капиллярных кровотечений, кровотечений слабой и средней интенсивности. Для заживления поверхностных неинфицированных ран, в том числе ожогов, трофических язв, пролежней, а также для обработки кожи вокруг стомы.

Способ применения

После туалета раны порошок наносится тонким слоем на влажную раневую поверхность или на влажную поверхность вокруг стомы. СТАТИН-ПАЛЬМА® наносится до тех пор, пока верхний слой не перестанет промокать.

При обработке раневой поверхности или кожи вокруг стомы образовавшееся гелевое покрытие легко удаляется тампоном, смоченным любым раствором антисептика. Гель обеспечивает хороший водо- и газообмен и может оставаться на коже или раневой поверхности до полного заживления.

Кожу вокруг стомы обрабатывают средством в тот период, когда пациент не использует калоприемник, и оставляют его на коже как можно дольше.

Перед использованием калоприемника средство

СТАТИН-ПАЛЬМА® необходимо удалить, кожу подсушить.

Противопоказания

Противопоказано при обработке инфицированных ран.

Область применения

Средство предназначено для применения в стационарных и амбулаторных медицинских учреждениях и в быту.

Форма выпуска, комплектация.

Средство выпускается в пакете из бумаги упаковочной с полимерным покрытием с фасовкой 1,0 г. Упаковывается в картонную коробку или в пакет из полиэтиленовой пленки с вложенной этикеткой. Инструкция прилагается.

Количество пакетов в упаковке должно быть 5 шт. или 50 шт.

Срок годности

Срок годности средства – 3 года.

Условия хранения и утилизации

Хранить при температуре от +5 до +40°С.

Использованное средство утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10, как отходы класса Б.

Производитель

ООО «ГК ПАЛЬМА» 117105, г. Москва Нагорный пр-д. д 12, корп. 1, этаж 3, пом. II ком. № 15.

Тел: +7 (495)921-37-19. E-mail: palma@palma-med.ru

ООО «ГК ПАЛЬМА» выпускает также:

БИНТЛИ®-Т – гипоаллергенный фиксирующий липкий бинт для фиксации повязок, игл, катетеров и т.п.

БИНТЛИ®-М – очень мягкий гипоаллергенный фиксирующий липкий бинт повышенной драпируемости для фиксации повязок на локтевом, коленном суставах и т.п.

АЛЬГИПОР-М – ранозаживляющее покрытие для лечения ран различной этиологии, ожогов, пролежней, трофических язв и др.