

УСТРОЙСТВО МОЧЕПРИЕМНОЕ ДЛЯ МУЖЧИН одноразового применения

ТУ 32.50.13-008-83228278-2018 (Рег. уд. № РЗН 2014/1543 от 13.08.2019)

Устройство мочеприемное УРОЦЕЛ® предназначено для мужчин, страдающих любыми формами недержания мочи. **Комплект рассчитан на 10 дней.** Наружный катетер (уропрезерватив) и герметизирующая полоска АБУЦЕЛ® предназначены для одноразового использования в течение суток.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в правильности выбранного Вами размера с помощью таблицы, размещенной на упаковке. Для этого измерьте обхват полового члена у основания (в мм) и разделите это значение на три. Полученное число должно соответствовать диаметру наружного катетера (см. таблицу на упаковке).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Перед использованием изделия рекомендуется сбрить волосы у основания полового члена, помыть и просушить половой член (**рис. 1**).

2. Герметизирующую полоску выньте из упаковки. Снимите защитную бумагу с одной стороны полоски. Этой стороной плотно, но не туго оберните полоску вокруг полового члена у его основания. Снимите защитную бумагу с другой стороны полоски. Свободные концы полоски плотно наложите друг на друга внахлест (**рис. 2**).

Не рекомендуется снимать герметизирующую полоску раньше, чем через сутки, в этом случае возможно раздражение кожи.

3. Наружный катетер с закатанным краем плотно приставьте к головке полового члена и, раскатывая край, наденьте его, полностью перекрывая герметизирующую полоску. Обожмите наружный катетер вокруг полоски для более плотного контакта (**рис. 3**). Излишки присыпки на наружном катетере могут быть причиной недостаточного контакта между катетером и полоской. В этом случае их следует удалить с внутренней поверхности катетера.

ВАЖНО! Если Вы выбрали правильный размер наружного катетера, но, тем не менее, испытываете дискомфорт, и катетер кажется Вам тугим, попробуйте срезать валик в верхней части полностью раскатанного катетера.

4. Отрежьте при необходимости входную (длинную) трубку мочеприемника до нужной длины. Плотно, до конца вставьте прилагаемый наконечник с колпачком в отверстие входной трубки. Снимите колпачок с наконечника и соедините с отводной трубкой наружного катетера (**рис. 4**).

5. Проденьте ремни в четыре верхние и две нижние прорези мочеприемника таким образом, чтобы ремень проходил под мочеприемником (**рис. 5**).

6. Закрепите мочеприемник на бедре или голени (мягкой поверхностью к коже) (**рис. 6, 7**).

7. Для опорожнения мочеприемника сдвиньте в сторону пробку выпускного крана. После опорожнения верните пробку в исходное положение (**рис. 8, 9**).

8. Мочеприемник следует ежедневно промывать раствором моющего средства, а затем ополаскивать водой. Для этого снимите мешок с ноги и отсоедините от наружного катетера. Промывайте мочеприемник через входную (длинную) трубку, открыв выпускной кран как указано в п. 7.

9. В ночное время рекомендуется использовать мочеприемник объемом 2 л с удлиненной входной трубкой. Подсоединить его можно через силиконовый переходник, не снимая основной мочеприемник (выпускной кран при этом должен быть открыт) (**рис. 10**).

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса А. **ВНИМАНИЕ!** Не выбрасывайте устройство в канализацию!


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость.


ВНИМАНИЕ! В комплект входят изделия из латекса.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ


Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5°C до +40°C. Срок годности 3 года.

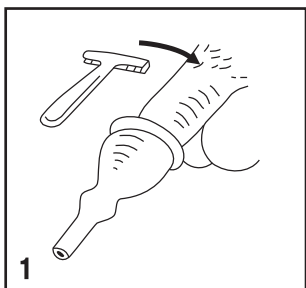


1
Побрить, помыть и просушить половой член

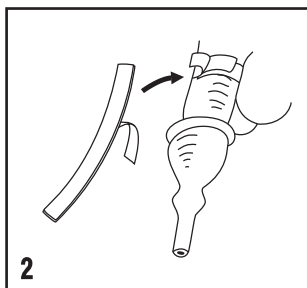


2
Наклеить герметизирующую полосу и надеть наружный катетер

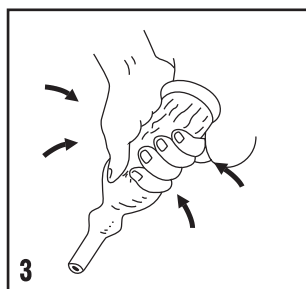


3
Обжать наружный катетер вокруг герметизирующей полосы

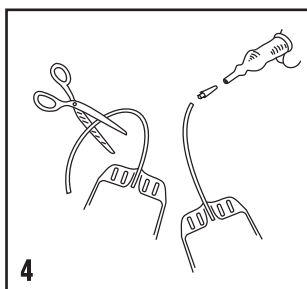

4
Укоротить трубку до нужной длины и подсоединить мочеприемник к наружному катетеру

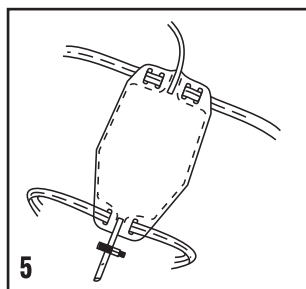


5
Продеть ремни в четыре верхние и две нижние прорези мочеприемника

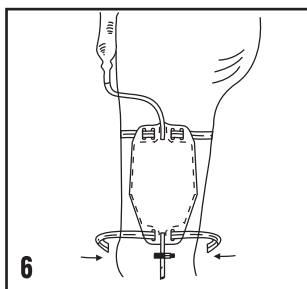


6
Надеть мочеприемник на бедро




7
Можно надеть мочеприемник на голень

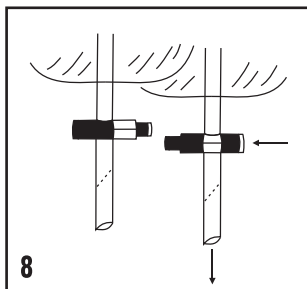

8
Открыть выпускной кран

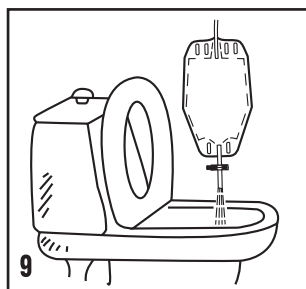

9
Опорожнить мочепремник в унитаз

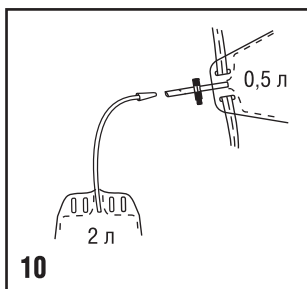

10
В ночное время подсоединить мочеприемник объемом 2 л

Ремни УРОЦЕЛ® и герметизирующие полосы АБУЦЕЛ® можно приобрести, при необходимости, отдельно.

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «ГК ПАЛЬМА», Россия, 117105, г. Москва, Нагорный проезд, дом 12, корпус 1, этаж 3, помещение II, комната 15.
тел. +7(495)921-37-19, email: palma-med.ru