


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УРОПРИЁМНИКА ОДНОКОМПОНЕНТНОГО САМОФИКСИРУЮЩЕГОСЯ ДЛЯ УХОДА ЗА СТОМОЙ «ПАЛЬМА»®

ТУ 9398-013-83228278-2015 (Пер. уд. № РЗН 2016/4778 от 22.11.2024)

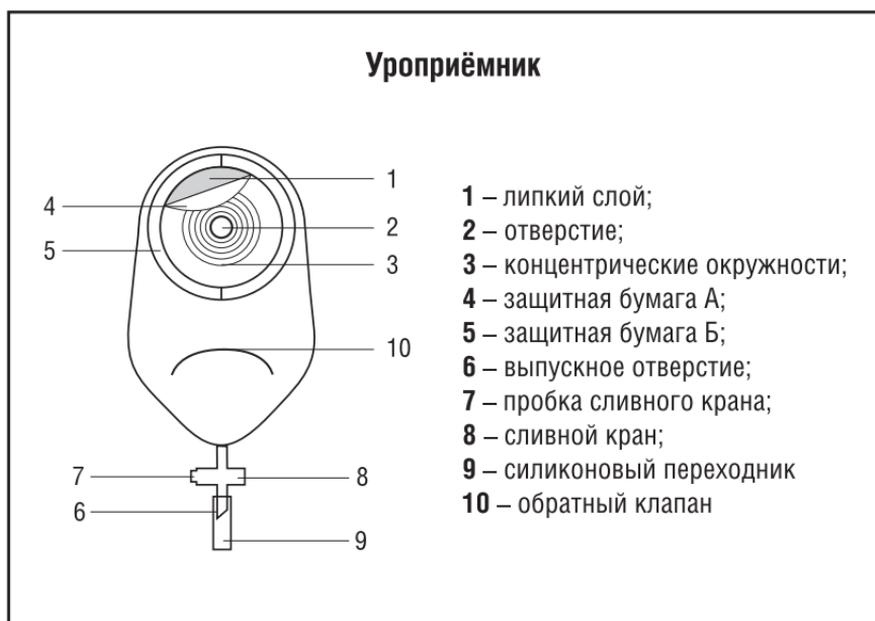

Уроприёмник ПАЛЬМА® предназначен для сбора и отвода выделений у пациентов с уростомиями. Это современное одноразовое изделие надёжно фиксируется на теле пациента, обеспечивая герметичность и отсутствие запаха в течение нескольких дней. Встроенный обратный клапан исключает возможность обратного заброса мочи в уростому, гарантируя высокий уровень безопасности и гигиены.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫРЕЗАТЬ ОТВЕРСТИЕ В УРОПРИЁМНИКЕ

Отверстие уроприёмника должно соответствовать форме и размеру стомы.

Липкий слой уроприёмника покрыт защитной бумагой с нанесёнными на нее концентрическими окружностями. Отверстие для стомы можно вырезать по этим концентрическим окружностям или по индивидуальному шаблону в случае нестандартной формы.

Шаблон расположен на обратной стороне упаковки. Чтобы воспользоваться им, приложите прозрачную плёнку к стоме и обведите её контуры маркером. Затем вырежьте отверстие в плёнке и перенесите его форму на шаблон.

Важно помнить, что стома может немного меняться, особенно в течение первых двух месяцев после операции. Рекомендуем регулярно проверять размер стомы и при необходимости корректировать форму отверстия уроприёмника.

Во избежание пореза ёмкости разведите стенки в разные стороны (**рис. 1**) и осторожно вырежьте отверстие для стомы, не задевая заднюю стенку уроприёмника (**рис. 2**). **Рекомендуем пользоваться ножницами с закругленными лезвиями с тупыми концами.**

КАК ПОДГОТОВИТЬ СТОМУ

Для того чтобы уроприёмник хорошо держался на теле, кожа вокруг стомы должна быть чистой, сухой, без кремов, мазей и пр. Вымойте кожу вокруг стомы теплой водой с мылом и высушите мягким полотенцем или феном. **Не наклеивайте уроприёмник на влажную кожу!**

При неосторожном прикосновении к стоме может возникнуть кровотечение. Не беспокойтесь, это нормально, т. к. поверхность стомы очень

Не наклеивайте уроприёмник на влажную кожу, а также на кожу, обработанную мазью, кремом и т. д.

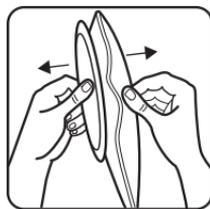


рис. 1



рис. 2

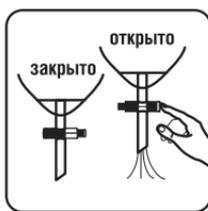


рис. 3



рис. 4



рис. 5



рис. 6

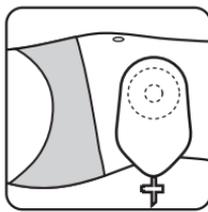


рис. 7

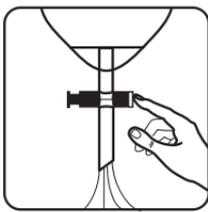


рис. 8

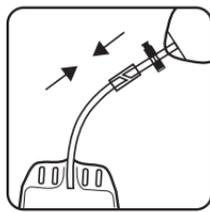


рис. 9

нежная. Осторожно приложите к стоме чистую салфетку, и кровотечение скоро прекратится. Для мгновенной остановки кровотечения Вы также можете воспользоваться **гемостатическим средством СТАТИН-ПАЛЬМА®**.

КАК НАКЛЕИТЬ УРОПРИЁМНИК

Перед началом использования убедитесь, что сливной кран закрыт (**рис. 3**). Для эффективного наклеивания в течение нескольких минут прогрейте липкий слой, не снимая защитную бумагу с кольца. Высокая температура не требуется, достаточно подержать уроприёмник между ладонями или подмышкой.

Снимите защитную бумагу А (**рис. 4**), не затрагивая при этом защитную бумагу Б. Наклейте уроприёмник на тело, начиная с нижнего края отверстия для стомы. Далее удалите защитную бумагу Б: сначала одну половинку, потом другую, затем приложите липкий материал к телу (**рис. 5**).

Для лучшего приклеивания уроприёмника плотно прижмите его к телу, разгладьте липкий слой от стомы к краям и удерживайте не менее минуты (**рис. 6**).

Если стомированный пациент лежачий, уроприёмник можно наклеивать выпускным отверстием набок (рис. 7).

КАК ОПОРОЖНИТЬ УРОПРИЁМНИК

Опорожнять уроприёмник следует в туалете, не снимая со стомы.

Не допускайте заполнения ёмкости более, чем наполовину, это увеличивает риск отклеивания уроприёмника.

Для опорожнения уроприёмника сдвиньте в сторону пробку сливного крана (**рис. 8**). После опорожнения верните пробку в исходное положение.

В ночное время рекомендуем использовать дополнительно мешок-моче-приёмник. Присоединить его можно через силиконовый переходник, не снимая уроприёмник со стомы (**рис. 9**). После присоединения следует открыть сливной кран на уроприёмнике.

КАК СМЕНИТЬ УРОПРИЁМНИК

Меняйте уроприёмник по мере необходимости: при возникновении запаха, при подтекании в месте крепления, при ощущении каких-либо неудобств или дискомфорта. Снимайте уроприёмник медленно, осторожно отслаивая липкий слой, придерживая при этом кожу рукой. В случае возникновения болезненных ощущений при снятии уроприёмника можно ненадолго приложить в кольцо "холод": материал кольца станет более твердым и отклеится от кожи проще.

Следует избегать необоснованно частой смены уроприёмника, это может привести к раздражению кожи.

ВНИМАНИЕ!

Допускается наклеивание уроприёмника на оставшиеся на коже фрагменты липкого слоя.

Для более длительного использования уроприёмника, а также для защиты кожи вокруг стомы **рекомендуем пользоваться пастой АБУЦЕЛ®**.

Для дополнительной фиксации уроприёмника, особенно в случае сложного рельефа тела, **рекомендуем использовать адгезивные полукольца СОФАЛЬ®**.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не выбрасывайте уроприёмник в канализацию! После опорожнения заверните уроприёмник в бумагу или в пластиковый пакет и выбросите в мусорный контейнер.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните уроприёмники в коробочке при температуре от +5 °С до +30 °С. Рекомендуется хранить уроприёмники вдали от прямых солнечных лучей. Не храните уроприёмники в холодильнике!

ООО «ГК ПАЛЬМА» ВЫПУСКАЕТ:

- Однокомпонентные калоприёмники АБУЦЕЛ®;
- Однокомпонентные кало- и уроприёмники для чувствительной кожи ТРИОЦЕЛ® (в т. ч. детские);
- Двухкомпонентные кало- и уроприёмники БИНАЦЕЛ®;
- Средства для ухода за стомой:

Паста АБУЦЕЛ® – для выравнивания поверхности кожи вокруг стомы с целью улучшения приклеивания кало- или уроприёмника и увеличения срока его использования;

Паста ТРИОЦЕЛ® – для создания защитного слоя при наличии раздражения кожи вокруг стомы на период заживления;

Адгезивные полукольца СОФАЛЬ® – для дополнительной фиксации кало- и уроприёмников и продления срока их использования;

СТАТИН – порошкообразное средство для остановки кровотечений и заживления кожи вокруг стомы при её воспалении;

Пояс БИНАЦЕЛ® – для дополнительной фиксации двухкомпонентных кало- или уроприёмников;

Бинт липкий БИНТЛИ® – для дополнительной фиксации кало- или уроприёмника.