




ООО «ГК ПАЛЬМА»

Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево, ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел.: +7(495) 921-3719, www.palma-med.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КАЛОПРИЕМНИКОВ ПОЛИМЕРНЫХ ДРЕНИРУЕМЫХ ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ САМОФИКСИРУЮЩИХСЯ «ПАЛЬМА®»

ТУ 32.50.13-020-83228278-2019 (Рег. уд. №РЗН 2019/9240 от 05.11.2024)

КАЛОПРИЕМНИКИ

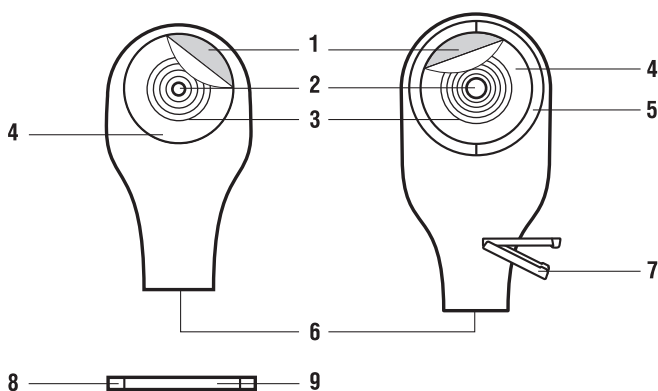

- 1 – липкий слой; 2 – отверстие; 3 – концентрические окружности;
4 – защитное покрытие А; 5 – защитное покрытие Б;
6 – дренажное отверстие; 7 – пластиковый зажим;
8 – гибкий зажим; 9 – защитная бумага на гибком зажиме

Калоприемники предназначены для сбора выделений у пациентов с коло- и илеостомой. **Калоприемник следует использовать в течение нескольких дней без снятия со стомы.**

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫРЕЗАТЬ ОТВЕРСТИЕ В КАЛОПРИЕМНИКЕ

Отверстие калоприемника должно соответствовать форме и размеру стомы.

Липкий слой калоприемника покрыт защитным покрытием с нанесенными на него концентрическими окружностями.

Отверстие для стомы можно вырезать по концентрическим окружностям или по индивидуальному шаблону, который можно изготовить самостоятельно из плотного картона. Шаблон должен соответствовать размеру стомы.

Во избежание пореза емкости разведите стенки в разные стороны (**рис. 1**) и осторожно вырежьте отверстие для стомы, не задевая заднюю стенку калоприемника (**рис. 2**). **Рекомендуем пользоваться ножницами с закругленными лезвиями с тупыми концами.**

КАК ЗАКРЫТЬ КАЛОПРИЕМНИК ПЛАСТИКОВЫМ ЗАЖИМОМ

Раскройте зажим, положите его одинарную часть на калоприемник на расстоянии 2–3 см от края дренажного отверстия, перегните край калоприемника и расправьте его от складок (**рис. 3**), после чего закройте зажим до щелчка.

КАК ЗАКРЫТЬ КАЛОПРИЕМНИК ГИБКИМ ЗАЖИМОМ

Отделите один гибкий зажим по линии перфорации. Снимите с него защитную бумагу и наклейте на нижнюю, открытую часть дренажного отверстия со стороны, прилегающей к телу, отступив от края 5–10 мм. Затем оберните гибкий зажим 3–4 раза вокруг собственной оси по направлению к телу (**рис. 4**), после чего концы запорного элемента загните на внешнюю, не прилегающую к телу сторону калоприемника.

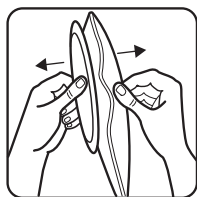


рис. 1



рис. 2

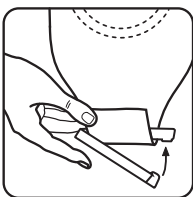


рис. 3

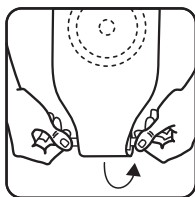


рис. 4

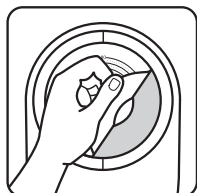


рис. 5

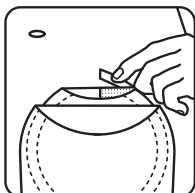


рис. 6



рис. 7



рис. 8

КАК ПОДГОТОВИТЬ СТОМУ

Для того, чтобы калоприемник хорошо держался на теле, кожа вокруг стомы должна быть чистой, сухой, без кремов, мазей и пр. Вымойте кожу вокруг стомы теплой водой с мылом и высушите мягким полотенцем или феном.

Не наклеивайте калоприемник на влажную кожу! Тщательно просушите кожу вокруг стомы для лучшего приклеивания калоприемника.

При неосторожном прикосновении к стоме может возникнуть кровотечение. Не беспокойтесь, это нормально, так как поверхность стомы очень нежная. Осторожно прижмите к стоме чистую салфетку, и кровотечение быстро прекратится.

КАК НАКЛЕИТЬ КАЛОПРИЕМНИК

Перед наклеиванием в течение нескольких минут прогрейте липкий слой (не снимая защитного покрытия с калоприемника) между ладонями, подмышкой или на каком-либо закрытом источнике тепла (батареи отопления, обогревателе и т.п., температура которых не превышает +30 °С).

Затем снимите защитное покрытие А (**рис. 5**), не затрагивая при этом защитное покрытие Б. Начиная с нижнего края отверстия для стомы, наклейте калоприемник на тело. После этого удалите защитное покрытие Б (при его наличии): сначала одну половинку, потом другую, затем приложите липкий материал к телу (**рис. 6**).

Для лучшего приклеивания калоприемника плотно прижмите его к телу и разгладьте липкий слой от стомы к краям (**рис. 7**).

Если стомированный пациент — лежачий, то калоприемник можно наклеивать дренажным отверстием набок (рис. 8).

КАК ОПОРОЖНЯТЬ КАЛОПРИЕМНИК

Опорожнять калоприемник следует в туалете.

Не допускайте заполнения емкости более, чем наполовину, а также скопления большого количества газов и сильного раздувания емкости, это увеличивает риск отклеивания калоприемника.

Освобождать калоприемник от содержимого следует через дренажное отверстие, не снимая со стомы. Для этого откройте зажим, разверните нижнюю часть калоприемника и опорожните его. Протрите дренажное отверстие туалетной бумагой или салфеткой. Снова закройте дренажное отверстие.

КАК ОСВОБОДИТЬ КАЛОПРИЕМНИК ОТ ГАЗОВ

Для освобождения калоприемника от скопившихся газов используйте дренажное отверстие. Для отвода газов можно также использовать **Фильтры для калоприемников** (в комплект не входят, поставляются отдельно).

КАК СМЕНИТЬ КАЛОПРИЕМНИК

Меняйте калоприемник по мере необходимости: при возникновении запаха, при подтекании в месте крепления, при ощущении каких-либо неудобств или в других случаях. Снимайте калоприемник медленно, осторожно отслаивая липкий слой, придерживая при этом кожу рукой.

Следует избегать частой, не оправданной необходимостью смены калоприемника. При этом возможно раздражение кожи!

ВНИМАНИЕ!

Допускается наклеивание калоприемника на оставшиеся на коже фрагменты липкого слоя!

Для более длительного использования калоприемника, а также для защиты кожи вокруг стомы **рекомендуем пользоваться пастой АБУЦЕЛ®.**

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не выбрасывайте калоприемник в канализацию! После опорожнения заверните калоприемник в бумагу или в пластиковый пакет и выбросите в мусорный контейнер. Утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Рекомендуется хранить калоприемники при температуре от +5 °С до +30 °С вдали от прямых солнечных лучей.

Не храните калоприемники в холодильнике!

ООО «ГК ПАЛЬМА» ВЫПУСКАЕТ:

Двухкомпонентные кало- и уроприемники БИНАЦЕЛ®;

Однокомпонентные уроприемники ТРИОЦЕЛ-С-УРО;

Пасту АБУЦЕЛ® — для выравнивания поверхности кожи вокруг стомы с целью улучшения приклеивания кало- или уроприемников и увеличения срока их использования;

Пасту ТРИОЦЕЛ® — для создания защитного слоя при раздражении кожи вокруг стомы;

Полукольцо СОФАЛЬ для дополнительной фиксации и продления срока использования кало- и уроприемников;

Зажимы для калоприемников: пластиковый и гибкий;

Фильтры для калоприемников;

СТАТИН — порошкообразное средство для заживления кожи вокруг стомы при ее воспалении;

Пояс БИНАЦЕЛ® — для дополнительной фиксации двухкомпонентных кало- или уроприемников;

Бинт липкий БИНТЛИ® — для дополнительной фиксации кало- или уроприемников.