

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

покрытия защитного пастообразного
для кожи вокруг стомы **ТРИОЦЕЛ®**
(Рег. уд. № РЗН 2016/4897 от 29.03.2018)

Покрытие защитное пастообразное (далее паста) **ТРИОЦЕЛ** используется в случае повреждения и раздражения кожи вокруг стомы.

Паста **ТРИОЦЕЛ** предназначена для создания защитного барьера, предохраняющего раздраженную или поврежденную кожу вокруг стомы, а также для заполнения неровностей на коже вокруг стомы.

Паста **ТРИОЦЕЛ** не содержит спирта, поэтому не вызывает чувства жжения при нанесении.

ВНИМАНИЕ! Необходимо иметь ввиду, что при использовании пасты **ТРИОЦЕЛ** время ношения кало- и уроприемников может снизиться по сравнению с временем ношения кало- и уроприемников, наклеенных без использования пасты.

Как пользоваться пастой **ТРИОЦЕЛ**

Обработайте кожу вокруг стомы теплым мыльным раствором или рекомендованным антисептическим средством и **высушите мягким полотенцем или бумажной салфеткой.**

Поднесите горлышко тюбика к поврежденному участку кожи.

Надавливая на тюбик, постепенно нанесите небольшое количество пасты на раздраженные участки кожи тонким слоем.

При необходимости разровняйте пасту пальцем или с помощью пластиковой ложечки, лопатки или шпателя.

Удалите остатки пасты с рук **сухой бумажной салфеткой.**

Сразу после нанесения пасты наклейте кало- или уроприемник и зафиксируйте его на протяжении некоторого времени (около 10 - 20 сек.) для лучшего прилегания.

Закройте тюбик.

Удаление пасты **ТРИОЦЕЛ**

При смене кало- или уроприемника паста **ТРИОЦЕЛ**, как правило, удаляется с кожи вместе с кольцом кало- или уроприемника.

ВАЖНО! Если после снятия кало- или уроприемника на коже осталось некоторое количество пасты, новый слой пасты можно накладывать на неудаленные остатки.

При необходимости остатки пасты осторожно удалите **сухой бумажной салфеткой.**

Условия хранения

Хранить закрытый тюбик при комнатной температуре в недоступном для детей месте.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов пасты **ТРИОЦЕЛ.**