

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
покрытия защитного пастообразного –  
**пасты АБУЦЕЛ®**

ТУ 32.50.50-009-83228278-2018

(Рег. уд. № РЗН 2014/1388 от 05.11.2024)

Покрытие защитное пастообразное для кожи вокруг стомы **АБУЦЕЛ®** (далее Паста **АБУЦЕЛ®**) предназначено для заполнения неровностей кожи вокруг стомы, создания защитного барьера и продления срока использования кало- и уроприёмников.

Паста **АБУЦЕЛ®** защищает кожу и рубцующуюся ткань вокруг стомы.

**Внимание!** Пасту можно использовать **только** для наружного применения и только в сочетании с кало- и уроприёмниками.

**Преимущества пасты АБУЦЕЛ®**

Паста **АБУЦЕЛ®** обеспечивает дополнительную защиту и питание воспалённой кожи вокруг стомы благодаря наличию в её составе альгината натрия, натрийкарбоксиметилцеллюлозы и касторового масла.

**Как пользоваться пастой АБУЦЕЛ®**

Обработайте кожу вокруг стомы тёплым мыльным раствором или рекомендованным антисептическим средством и высушите полотенцем.

**Важно!** Накладывайте пасту **АБУЦЕЛ®** на чистую сухую кожу.

Отвинтите крышку тюбика и проколите защитную мембрану. Выдавите пасту **АБУЦЕЛ®** из тюбика на кожу вокруг стомы. Наносить следует только такое количество пасты, которое необходимо для сглаживания неровностей кожи.

Пасту распределите пальцем до получения ровной поверхности. Выдержите 20-30 секунд. Наклейте кало- или уроприёмник.

**Внимание!** Паста **АБУЦЕЛ®** содержит спирт, поэтому при нанесении может вызывать чувство жжения.

Пасту можно наносить также непосредственно на липкое кольцо однокомпонентных или двухкомпонентных кало- или уроприёмников.

Если на коже имеются глубокие складки или рубцы, можно заполнять их слоями, подсушивая пасту в течение 20-30 секунд перед нанесением следующего слоя.

**Внимание!** Сразу после выдавливания пасты быстро и надежно закройте тюбик, чтобы избежать высыхания содержимого.

### **Удаление пасты АБУЦЕЛ®**

После смены кало- или уроприёмника вымойте кожу вокруг стомы теплой мыльной водой. Не волнуйтесь, если после этого на коже останется некоторое количество пасты. Новый слой пасты можно накладывать на неудаленные остатки.

### **Условия хранения пасты АБУЦЕЛ®**

Храните тщательно закрытый тюбик **при температуре от +5°C до +40°C** в недоступном для детей месте.

Использованный тюбик утилизируется вместе с бытовыми отходами, как отходы класса А по СанПиН 2.1.3684.

### **Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость.

### **Сведения о производителе**

ООО «ГК ПАЛЬМА», Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево, ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел.: +7(495)921-37-19, [www.palma-med.ru](http://www.palma-med.ru)