

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
покрытия защитного пастообразного
для кожи вокруг стомы ТРИОЦЕЛ**

(Рег. уд. № РЗН 2016/4897 от 22.11.2024)

Покрытие защитное пастообразное (далее паста) ТРИОЦЕЛ используется в случае повреждения и раздражения кожи вокруг стомы.

Паста ТРИОЦЕЛ предназначена для создания защитного барьера, предохраняющего раздраженную или поврежденную кожу вокруг стомы, а также для заполнения неровностей на коже вокруг стомы.

Паста ТРИОЦЕЛ не содержит спирта, поэтому не вызывает чувства жжения при нанесении.

Указания по применению

Наносить покрытие следует круговыми движениями на кожу вокруг стомы. Покрытие при нанесении должно иметь комнатную температуру или температуру тела.

Отвинтить крышку тубы, нанести покрытие на подлежащие обработке участки кожи вокруг стомы и разровнять его пальцем или с помощью шпателя. Избыток пасты возможно удалить шпателем или салфеткой.

Закрыть тубу.

Наклеить устройство для ухода за стомой (кало- или уроприемник).

При замене кало- или уроприёмника остатки покрытия удалить салфеткой и смыть тёплой мыльной водой, после чего промыть и осушить кожу.

Условия хранения

Хранить закрытый тюбик при комнатной температуре.

Использованный тюбик утилизируется вместе с бытовыми отходами, как отходы класса А по СанПиН 2.1.3684.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов пасты ТРИОЦЕЛ

Сведения о производителе

ООО «ГК ПАЛЬМА», Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево, ул. Советская, д. 4, стр. 1.
тел: +7(495)921-3719, www.palma-med.ru